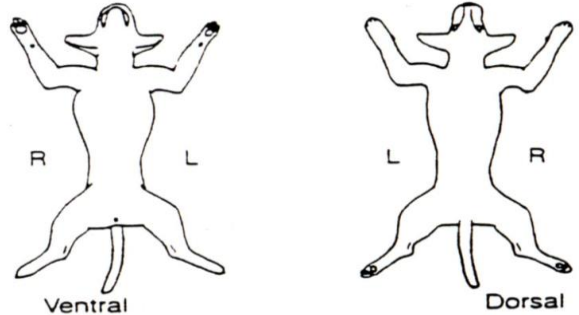


ช่องว่างสำหรับติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลสัตว์ป่วย

กรณารับุชื่อนายสัตวแพทย์ผู้ส่ง

แบบส่งตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy)

ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

วันที่รับตัวอย่าง (สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)	กรณารับุชื่อนายสัตวแพทย์ผู้ส่ง	Biopsy No:
History and clinical signs : กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน ** (กรณีไม่มีประวัติจะไม่รับตัวอย่าง)	Sample : Tumor/Mass/Lymph node (Gross appearance) :  Indicate Lesion Location:	
	Method of collection : ☐ Incision ☐ Excision ☐ Tru cut ☐ Endoscope ☐ Punch biopsy ☐	
ผลการตรวจอื่นๆ/ผลการตรวจครั้งก่อน ถ้ามีโปรดระบุ: Biopsy:..... Cytology:..... CBC/Blood chemistry:..... Other:..... Describe gross lesion :	Sample : ☐ Skin ☐ Tumor/mass..... ☐ Lymph node..... ☐ Visceral organ..... Color : Size : Shape : ☐ round ☐ oval ☐ ulcer ☐ other..... Consistency : ☐ soft ☐ firm ☐ hard Content : ☐ purulent ☐ seropurulent ☐ milk-like ☐ other..... Surface : ☐ smooth ☐ rough ☐ multilobular ☐ ulcerated Margin : ☐ sessile ☐ invasive ☐ pedunculated	

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างและติดตามผลทางห้องปฏิบัติการ (Biopsy)

- กรอกข้อมูลในใบส่งตรวจให้ครบถ้วน
- ติดฉลากระบุตำแหน่งที่ภาชนะบรรจุให้ชัดเจน 1 ตัวอย่างต่อ 1 ใบส่ง
- ชิ้นเนื้อขนาดเล็ก วางลงบนผ้าก๊อชแล้วบรรจุลงในภาชนะส่งตรวจ ชิ้นเนื้อที่มีขนาดใหญ่หรือมีเยื่อหุ้ม (capsule) ควรผ่าชิ้นเนื้อโดยไม่ขาดจากกัน
- แช่น้ำยา 10% neutral buffered formalin (รับน้ำยาที่ห้อง 139 หรือ ห้อง 142 โรงพยาบาลสัตว์ตึกเก่า ชั้น 1)
- ส่งตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา (ห้อง 142/1 โรงพยาบาลสัตว์ตึกเก่า ชั้น 1)
- การรายงานผล กรณีที่ 1 รายงานสรุปผลได้ด้วยการย้อมสี H&E ภายใน “14-21 วันทำการ”

กรณีที่ 2 ไม่สามารถสรุปผลได้ด้วยสี H&E จะมีการแนะนำให้ส่งย้อมสีพิเศษเพิ่มเติมมาในการรายงานผล

- จาก กรณีที่ 2 ห้องปฏิบัติการติดต่อหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเจ้าของสัตว์และนายสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อยืนยันการย้อมสีพิเศษ
- รายงานผลเพิ่มเติมจากการย้อมสีพิเศษภายใน 7-10 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการยืนยันการย้อมสีเพิ่มเติม

รายงานผลผ่านระบบรายงานผลออนไลน์ ภายในโรงพยาบาลสัตว์ หรือ โทรสอบถามผลที่เบอร์ภายใน “2117” ในวันและเวลาทำการ